

## Skötselråd

Ljudslangen kan behöva rengöras från öronvax och fukt.

Tag isär slang och brusapparat

(lossa vid slanganslutningen)

och rengör i lämpligt rengöringsmedel.

Plastslangen blåses ren från vatten.

Sätt tillbaka slangen på brusapparaten.

Apparaten är känslig för vatten och fukt.

Torka apparaten utvändigt med ett mjukt tyg

och lägg den vid behov att torka t. ex. över ett värmeelement.

Apparat eller batteri får aldrig utsättas för stark värme.

För skötsel och rengöring av hörapparat finns speciellt anpassade produkter under varumärket HADEO.

Se mer på vår hemsida [www.medilink.se](http://www.medilink.se) eller fråga på din hörcentral

## Utsätt inte apparaten för

- hårda stötar eller slag
- hårspray
- stark värme
- starka magnetfält, högfrekvensfält eller röntgenstrålning
- vatten och tvål

HANSATON Hör- och brusapparater är konstruerade för att generera ett minimum av elektromagnetiska fält och också för att störas minimalt av magnetiska fält.

Emellertid kan detta inte helt uteslutas vid användning av mobiltelefon.



Personliga inställningar/ program

---

---

---



## Bruksanvisning



## HANSATON WAVE CYMBA

Brusgenerator


Svensk distributör

**MEDILINK**

Box 135 711 23 LINDESBERG  
Tel 0581-122 33 Fax 0581-109 34  
[info@medilink.se](mailto:info@medilink.se)  
[www.medilink.se](http://www.medilink.se)

### WARNING!


Vid full effekt alstrar hörapparaten ljudnivåer som kan vara skadliga för hörseln. Starta aldrig hörapparaten på full volym.

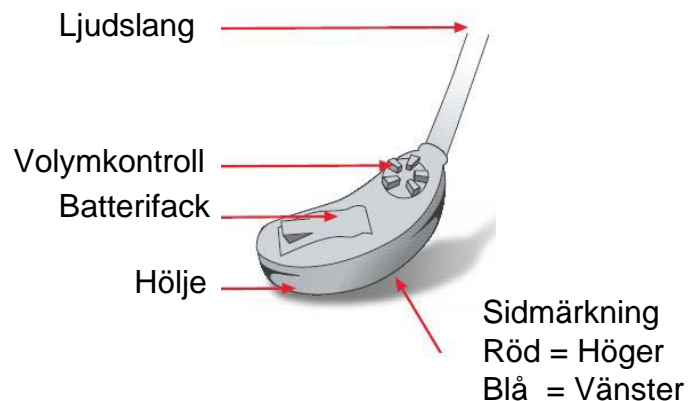

### Isättning och byte av batteri

Batterityp: 10

- Öppna batterifacket och lägg batteriet i det öppna batterifacket med den negativa polen (-) inåt.
- Stäng batterifacket.
- Med ett nytt batteri kan det ta någon minut innan batteriet ger full effekt.

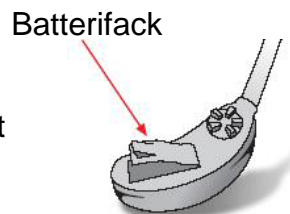

minuspole



Byt batteri

- om ljudstyrkan (volymen) blir svagare
- om ljudkvaliteten försämras
- om hörapparaten stängs av automatiskt (föregås av korta varningssignaler)

### Slå på och av hörapparaten

Batterifacket används även som strömbrytare.

Slå på: Stäng batterifacket helt.

Slå av: Öppna batterifacket.

Du kan även slå på och slå av apparaten genom att använda volymkontrollen.

### Höger apparat

Medurs (framåt) = Slår på apparaten

Moturs (bakåt) = Slår av apparaten

### Vänster apparat

Moturs (framåt) = Slår på apparaten

Medurs (bakåt) = Slår av apparaten

**Ljudstyrkan** i hörapparaten kan varieras med volymkontrollen på apparatens utsida.

### Höger apparat

Medurs (framåt) = Starkare


Moturs (bakåt) = Svagare

### Vänster apparat

Moturs (framåt) = Starkare

Medurs (bakåt) = Svagare

Volymkontroll

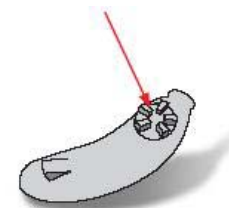

### ”Sleepnoiser”

För användning nattetid kan Cymba brusgenerator förses med ett mjukt silikonhölje vilket ger ökad komfort.