

INSTALLATION- OCH BRUKSANVISNING EWACS Öronspolare.

INGÅENDE MATERIAL

Snabbkopplingsatts till vattenblandare (3 delar varav snabbkoppling + en gängadapter används). **Tryckregulator**, **Spolslang** och **Spolpistol** samt 100 st **Spolmunstycken**, ingår i leveransen. Samtliga delar kopplas samman med snabbkopplingar.

INSTALLATION

Öronspolaren ansluts till vanlig vattenblandare som helst bör vara av termostattyp. Byt ut befintlig strålsamlare (sil) på vattenblandaren mot snabbkoppling. Gängadapters för ut- eller invändig gänga ingår i leveransen. Använd medföljande packningar så att läckage undviks. Övriga delar kopplas ihop i nämnd ordning. Kontrollera att snabbkopplingarna låser ordentligt.

Grundinställning.

Öppna vattenkranen helt och håll in avtryckaren på spolhandtaget för inställning av spoltrycket. En del av vattnet ska strömma rakt igenom tryckregulatorn. Ställ in spoltrycket med den svarta ratten på regulatorn. Ratten går endast att vrida i utdraget läge. Grundinställning vid leverans är 0,2 bar. Vattenstrålens längd är då ca. 80 cm vid 10 cm fall. Dessa mått kan används som en enkel funktionskontroll. Regulatorn håller nu det inställda trycket oavsett ändringar i vattenledningstrycket. Lås ratten genom att trycka in den!

OBS! Öronspolning sker på läkares ansvar och beslut om lämpligt spoltryck bör tas i samråd med ansvarig läkare. Ovan angivna värden är endast en leveransinställning.

ANVÄNDNING.

Förberedelser före öronspolning:

Anslut regulatorn till vattenblandaren och koppla samman samtliga delar samt öppna kranen helt. Temperaturen justeras med vattenblandaren och kan primärt kontrolleras vid utloppet på regulatorn. Innan öronspolning påbörjas spolas hela utrustningen igenom ordentligt så att temperaturen stabiliseras och all luft spolats ut. Kontrollera temperaturen vid spolmunstycket innan behandling påbörjas. **Spoltrycket kan, vid behov och i samråd med ansvarig läkare, ökas eller minskas enligt ovan.**

Öronspolning.

Spolmunstyckets vinge stöds mot tragus. Trycket regleras med spolpistolens avtryckare så att en "mjukstart" erhålls och avtryckaren hålls därefter helt intryckt. Med denna metod används relativt stor mängd vatten. En "Rondskål med avlopp" för spillvattnet finns därför som tillbehör.

SKÖTSEL, DAGLIG TILLSYN och SÄKERHET.

Spolmunstycken byts ut och kastas eller rengörs (se baksidan) efter varje användning. **Övrig utrustning** tas dagligen isär i kopplingarna och **töms på vatten** för att undvika kalkavlagringar och oönskad bakterietillväxt som kan uppkomma vid kvarstående vatten. Slangen hängs upp och spolpistolen töms med intryckt avtryckare.

Innan spolning påbörjas skall spoltrycket kontrolleras. Vid onormal förändring av avläst eller uppskattat spoltryck ska utrustningen genast tas ur bruk och servicepersonal eller leverantör kontaktas.

Fler råd för användning och skötsel på omstående sida.

SKÖTSELRÅD för EWACS Öronspolare.

Förhindra kalkbeläggning och bakterietillväxt i kanaler och slang!

Tag isär regulator, slang och spolpistol och töm på vatten minst 1 gång per dag. Förvara utrustningens samtliga delar så att de tillåts att torka över natten. Slangen hängs upp för att torka och Spolpistolen töms genom att hålla in avtryckaren.

Slangen kan behöva bytas ut av hygieniska skäl. Intervallet beror på vattenkvalitet och användningsfrekvens men som regel minst 1 gång i månaden. Kontrollera om någon form av beväxning med mikroorganismer eller annan beläggning uppstår. Byt i så fall ut slangen!

Rutiner för rengöring av slangen i diskdesinfektor upprättas enligt lokala föreskrifter. För rengöring i diskdesinfektor måste utrustning för slangspolning finnas.

Spolmunstycken är i första hand avsedda för engångsbruk men kan vid behov rengöras i diskdesinfektor på samma sätt som plastslangen.

Genomspolning av hela utrustningen med friskt vatten ska göras före varje användning. Detta sker normalt i samband med genomspolning för att uppnå stabil temperatur.

Om ventiler eller kopplingar fungerar dåligt efter längre tids användning kan det bero på kalkbeläggning. **Avkalka** med speciellt kalklösningsmedel (som till kaffebyggare) eller vinäger, ättika eller liknande. Kärvande kopplingarna kan smörjas med armaturfett som är godkänt av livsmedelsverket eller med vanlig matolja.

Justering av spoltryck.

Ändra trycket med den svarta ratten på regulatorn. Den går endast att vrida i utdraget läge. Efter justering av trycket skall ratten låsas i intryckt läge, dels av säkerhetskäl och dels för att vatten kan tränga in utifrån och på sikt skada detaljer inuti ratten.

Använd inte regulatorratten till att stänga av vattnet med!

Tag alltid för vana att kontrollera trycket innan ni påbörjar spolning. Avläs manometervärdet och bedöm stråltrycket (bedöm trycket mot huden eller strålens längd som bör vara ca 80 cm vid 10 cm fall vid 0,2 bar).

Vid frågor kontakta Medilink AB

ring 0581-122 33

faxa 0581-109 34

maila info@medilink.se

Förvara denna instruktion i närheten av Öronspolarens användningsplats.