


Reparaturhinweise
Repair Instructions

**HANSATON
LOONA Slim**

Ausgabe gültig ab 04/10
Edition effective 04/10

**Bauteileübersicht mit Positionsnummern
Table of components with position numbers**

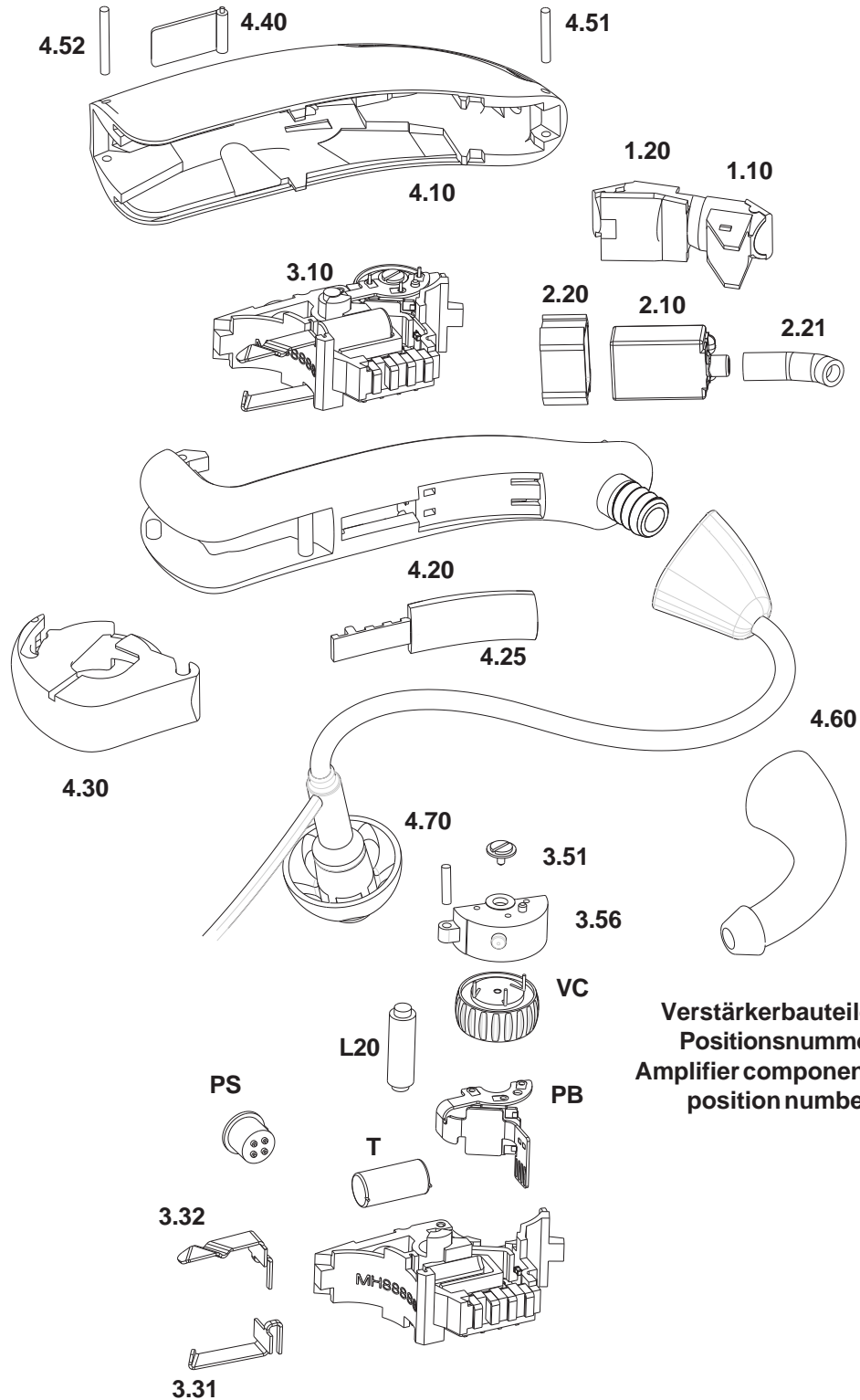

**Verstärkerbauteile mit
Positionsnummern
Amplifier components with
position numbers**

Reparaturhinweise

**HANSATON
LOONA Slim**

Ausgabe gültig ab **04/10**

Repair Instructions

Edition effective **04/10**

Ersatzteilstückliste - Spare Parts List

Pos.	Bezeichnung	Description	Bestell-Nr. Part No.
1.10	Mikrofon 8002, als paar	Microphone 8002, matched pair	51 890
1.20	Mikrofonlagerung	Microphone suspension	44 612
2.10	Hörer ED 30582	Receiver ED 30582	64 567
2.20	Hörerlagerung	Receiver suspension	10 713
2.21	Hörerschlauch	Nozzle for receiver	48 461
3.10	Verstärker, beige, incl. Mikrofon, Hörer	Amplifier, beige, incl. Microphone, Receiver	67 548
3.10	Verstärker, black, incl. Mikrofon, Hörer	Amplifier, black, incl. Microphone, Receiver	67 551
3.31	Batteriekontakt plus	Battery contact plus	44 560
3.32	Batteriekontakt minus	Battery contact minus	44 561
3.51	Schraube für Potentiometer	Screw for VC	48 466
VC	Potentiometer, beige	Potentiometer, beige	48 454
VC	Potentiometer, schwarz	Potentiometer, black	56 814
PS	Programmierzug	Programming socket	12 258
3.56	Potihalter	Holder VC	48 464
PB	Tastereinheit mit Flexband	Flexible push - button unit	48 453
T	Telefonspule	Telecoil	64 558
4.10	Color set, beige, standard	Color set, beige, standard	65 497
4.10	Color set, grey, standard	Color set, grey, standard	65 498
4.10	Color set, black	Color set, black	65 499
4.10	Color set, silver, standard	Color set, silver, standard	65 500
4.10	Color set, bronze	Color set, bronze	65 501
4.10	Color set, pearl	Color set, pearl	65 502
4.10	Color set, gold	Color set, gold	65 503
4.10	Color set, copper	Color set, copper	65 504
4.10	Top case, beige *	Top case, beige *	48 401
4.10	Top case, grey *	Top case, grey *	48 402
4.10	Top case, silver *	Top case, silver *	48 404
4.10	Top case, pearl *	Top case, pearl *	57 462
4.10	Top case, gold *	Top case, gold *	57 463
4.10	Top case, bronze *	Top case, bronze *	57 466
4.10	Top case, copper *	Top case, copper *	57 467
4.10	Top case, black *	Top case, black *	60 702
4.20	Bottom case, beige	Bottom case, beige	56 474
4.20	Bottom case, black	Bottom case, black	56 476
4.25	Typenschild, beige *	Type plate, beige *	64 542
4.25	Typenschild, black *	Type plate, black *	64 544
4.25	Set Typenschild, rot, blau	Set type plate, red, blue	64 547
4.30	Batterielade, beige	Battery compartment, beige	44 588
4.30	Batterielade, grey	Battery compartment, grey	44 589
4.30	Batterielade, black	Battery compartment, black	56 477
4.40	Abdeckklappe, beige *	Cover plate, beige *	43 926
4.40	Abdeckklappe, grey *	Cover plate, grey *	43 927
4.40	Abdeckklappe, silver *	Cover plate, silver *	44 658
4.40	Abdeckklappe, pearl *	Cover plate, pearl *	57 477
4.40	Abdeckklappe, gold *	Cover plate, gold *	57 480
4.40	Abdeckklappe, bronze *	Cover plate, bronze *	57 481
4.40	Abdeckklappe, copper *	Cover plate, copper *	57 482
4.40	Abdeckklappe, black *	Cover plate, black *	60 813
4.51	Gehäusestift 0,6 x 4,4mm *	Axle for case 0,6 x 4,4mm *	44 026
4.52	Gehäusestift 0,6 x 5,5mm *	Axle for case 0,6 x 5,5mm *	44 025
4.53	Achse für Taster 3,55mm	Axle for push button 3,55mm	48 467
4.60	Tragehaken mit Filter	Elbow with filter	46 794
	* im Color set enthalten	* Included in color set	

Reparaturhinweise

**HANSATON
LOONA Slim**

Ausgabe gültig ab **04/10**

Repair Instructions

Edition effective **04/10**

Ersatzteilstückliste - Spare Parts List

Pos.	Bezeichnung	Description	Bestell-Nr. Part No.
4.60	Nachfüllset Minischlauch Gr. 1, links	Refill set, tube 1 left	48 926
4.60	Nachfüllset Minischlauch Gr. 2, links	Refill set, tube 2 left	48 927
4.60	Nachfüllset Minischlauch Gr. 3, links	Refill set, tube 3 left	48 928
4.60	Nachfüllset Minischlauch Gr. 4, links	Refill set, tube 4 left	48 929
4.60	Nachfüllset Minischlauch Gr. 5, links	Refill set, tube 5 left	48 930
4.60	Nachfüllset Minischlauch Gr. 6, links	Refill set, tube 6 left	48 931
4.60	Nachfüllset Minischlauch Gr. 1, rechts	Refill set, tube 1 right	48 932
4.60	Nachfüllset Minischlauch Gr. 2, rechts	Refill set, tube 2 right	48 933
4.60	Nachfüllset Minischlauch Gr. 3, rechts	Refill set, tube 3 right	48 934
4.60	Nachfüllset Minischlauch Gr. 4, rechts	Refill set, tube 4 right	48 935
4.60	Nachfüllset Minischlauch Gr. 5, rechts	Refill set, tube 5 right	48 936
4.60	Nachfüllset Minischlauch Gr. 6, rechts	Refill set, tube 6 right	48 937
4.70	Nachfüllset Olive, 4mm	Refill set ear tip 4mm	50 847
4.70	Nachfüllset Olive, 6mm	Refill set ear tip 6mm	50 848
4.70	Nachfüllset Olive, 8mm	Refill set ear tip 8mm	48 992
4.70	Nachfüllset Olive, 10mm	Refill set ear tip 10mm	48 993
	Leitung 22 mm rot	Litz wire 22 mm red	42 013
	Leitung 22 mm rot grün	Litz wire 22 mm red green	42 014
	Leitung 22 mm grün	Litz wire 22 mm green	42 015
	Leitung 22 mm blau	Litz wire 22 mm blue	42 016
	Leitung 26 mm blau	Litz wire 26 mm blue	64 931
	Leitung 15mm, rot/schwarz, 2fach, verdreht	Litz wire 15mm, red/black, double, twisted	63 070
	Leitung 25mm, rot/schwarz, 3fach, verdreht	Litz wire 25mm, red/black, triple, twisted	63 071
L20	Induktionsspule (Wireless)	Induction coil (Wireless)	62 173