


Skötselråd

Öroninsatsen bör regelbundet rengöras från öronvax och fukt. **Vanlig insats** lossas från hörapparaten vid slanganslutningen och öroninsatsen rengörs i lämpligt rengöringsmedel.

Öppen insats lossas vid slanginfästningen och speciellt verktyg finns för rensning av plastslang och öroninsats.

Tipen/domen är utbyttbar.

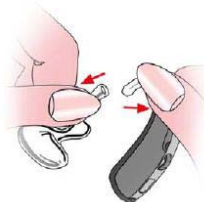

Skölj och torka insatsen efter rengöring och blås rent plastslangen från vatten. Sätt tillbaka insatsen på hörapparaten och vrid i rätt läge.

Hörapparaten är känslig för vatten och fukt. Torka hörapparaten utvändigt med ett mjukt tyg och lägg den att torka t. ex. över ett värmeelement. Hörapparat eller batteri får aldrig utsättas för stark värme.



För skötsel och rengöring av hörapparat finns speciellt anpassade produkter under varumärket HADEO.

Se mer på vår hemsida www.medilink.se eller fråga på din hörcentral

Utsätt inte hörapparaten för

- hårda stötar eller slag
- stark värme
- vatten och tvål och hårspray
- starka magnetfält, högfrekvensfält eller röntgenstrålning

HANSATON hörapparater är konstruerade för att generera ett minimum av elektromagnetiska fält och också för att störas minimalt av magnetiska fält. Emellertid kan detta inte helt uteslutas vid användning av mobiltelefon



Personliga inställningar/ program

velvet

Bruksanvisning




Svensk distributör

MEDILINK

Box 135 711 23 LINDESBERG
Tel 0581-122 33 Fax 0581-109 34
info@medilink.se
www.medilink.se

WARNING!


Vid full effekt alstrar hörapparaten ljudnivåer som kan vara skadliga för hörseln. Starta aldrig hörapparaten på full volym.

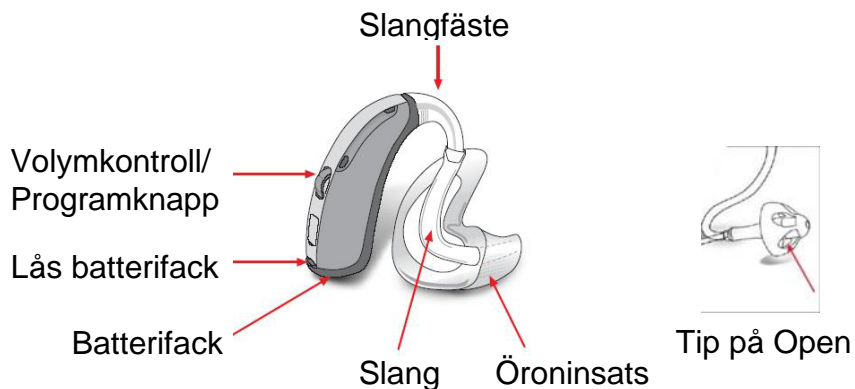

Isättning och byte av batteri

Batterityp: 312

- Öppna batterifacket och lägg batteriet i det öppna batterifacket med den negativa polen (-) inåt.
- Stäng batterifacket.
- Med ett nytt batteri kan det ta någon minut innan batteriet ger full effekt.

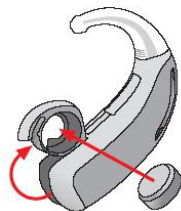

Om batterifacket är låst måste det låsas upp med ett lämpligt verktyg (spetsigt). Låsningen kommer man åt genom att batteriluckan öppnas något. Om låsning används så måste den aktiveras varje gång som batterifacket stängs. Låsning sker genom sidledsflyttning av låsmekanismen.

Byt batteri

- om ljudstyrkan (volymen) blir svagare
- om ljudkvaliteten försämras
- om hörapparaten stängs av automatiskt (föregås av korta varningssignaler)

Slå på och av hörapparaten

Batterifacket används även som strömbrytare.

Slå på: Stäng batterifacket helt.


Slå av: Öppna batterifacket en liten bit tills det tar stopp.



Ljudstyrkan i hörapparaten kan varieras med volymkontrollen på apparatens baksida.

Starkare: rulla framåt

Svagare: rulla bakåt

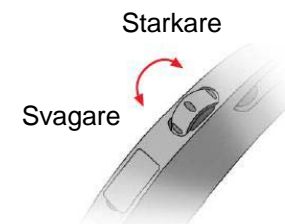

Programval

Volymkontrollen används även för att välja ett av dina individuella program.

När du byter hörs en signal som indikerar ditt val. Program 1 = en signal osv. Detta hjälper dig att anpassa hörapparaten till den ljudmiljö som du befinner dig i.

Volymkontroll/
programknapp

