

Skötselråd

Hörtelefonen skyddas av en dome med inbyggt vaxskydd.

Domen byts vid behov. Nya domer finns att tillgå på din hörcentral.

Hörapparatskalet har ett inbyggt mikrofonskydd och behöver bytas med jämna mellanrum.

Torka hörapparaten utvändigt med ett mjukt tyg och lägg den att torka t. ex. över ett värmeelement.

Hörapparat eller batteri får aldrig utsättas för stark värme.



För skötsel och rengöring av hörapparat finns speciellt anpassade produkter under varumärket HADEO.

Se mer på vår hemsida www.medilink.se eller fråga på din hörcentral

Utsätt inte hörapparaten för

- hårda stötar eller slag
- hårspray
- stark värme
- starka magnetfält, högfrekvensfält
- vatten och tvål
- eller röntgenstrålning

HANSATON hörapparater är konstruerade för att generera ett minimum av elektromagnetiska fält och också för att störas minimalt av magnetiska fält.

Emellertid kan detta inte helt uteslutas vid användning av mobiltelefon.



Personliga inställningar/ program



velvet^H

Bruksanvisning



X-mini

Hörapparat med yttre hörtelefon

Svensk distributör

MEDILINK

Box 135 711 23 LINDESBERG
Tel 0581-122 33 Fax 0581-109 34
info@medilink.se
www.medilink.se

WARNING!

Vid full effekt alstrar hörapparaten ljudnivåer som kan vara skadliga för hörseln. Starta aldrig hörapparaten på full volym.




- 1 Hörtelefon
- 2 Dome
- 3 Mikrofonskydd
- 4 Batterifack
- 5 Programknapp

Isättning och byte av batteri

Batterityp: 312

- Öppna batterifacket och lägg batteriet i det öppna batterifacket med den negativa polen (-) inåt.
- Stäng batterifacket.
- Med ett nytt batteri kan det ta någon minut innan batteriet ger full effekt.

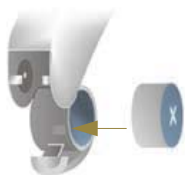

Ändring av ljudstyrka kan endast göras om man valt att ha en fjärrkontroll till din hörapparat.



Byt batteri


- om ljudstyrkan (volymen) blir svagare
- om ljudkvaliteten försämras
- om hörapparaten stängs av automatiskt (föregås av korta varningssignaler)

Slå på och av hörapparaten

Batterifacket används även som strömbrytare.

Slå på: Stäng batterifacket helt.

Slå av: Öppna batterifacket en liten bit tills det tar stopp.

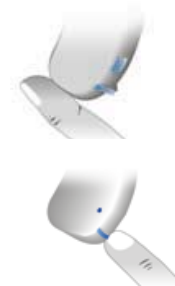

programknapp

Programval

Programknappen används för att välja ett av dina individuella program.

När du byter program hörs en signal som indikerar ditt val.

Program 1 = en signal osv. Detta hjälper dig att anpassa hörapparaten till den ljudmiljö som du befinner dig i.

