

Bruksanvisning



HANSATON Wave

Bredbands brusgenerator för tinnitusbehandling


Svensk distributör

MEDILINK

Box 135 711 23 LINDESBERG
Tel 0581-122 33 Fax 0581-109 34
info@medilink.se
www.medilink.se

WARNING!

Vid full effekt alstrar hörapparaten ljudnivåer som kan vara skadliga för hörseln. Starta aldrig hörapparaten på full volym.

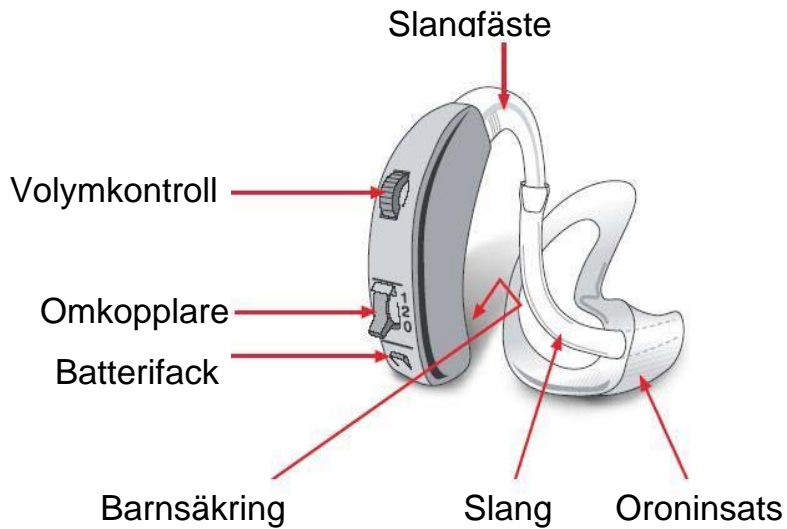


Isättning och byte av batteri

Batterityp: 13

- Öppna batterifacket och lägg i batteriet med minus polen (-) inåt i batterifacket.

-Stäng batterifacket


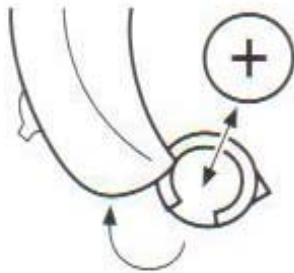


Minus pol



Med ett nytt batteri kan det ta någon minut innan batteriet ger full effekt.

(Om barnsäkringen är låst på din apparat så måste det låsas upp först med ett lämpligt verktyg).

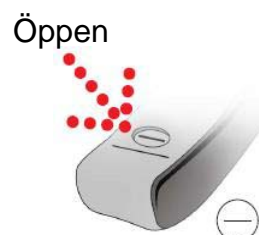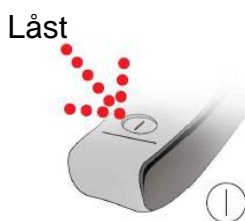

Byt batteri

- om ljudstyrkan (volymen) blir svagare
- om ljudkvaliteten försämras
- om hörapparaten stängs av automatiskt (föregås av korta varningssignaler)

Starta brusapparaten genom att ställa programomkopplaren i läge 1 el. 2.

Omkopplarens lägen:

1 = Slår på brusapparaten

2 = Slår på ditt individuella program

0 = Slår av brusapparaten




Volymkontroll

Du kan ställa in ljudstyrkan på din brusapparat från läge 1 till 4.

1 = svagaste ljud (ratten bakåt)


4 = starkaste ljud (ratten framåt)

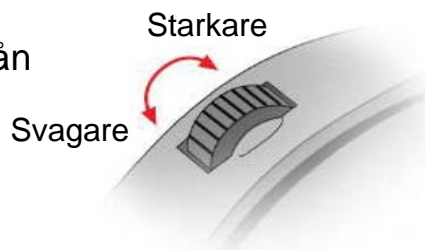

Skötselråd

Öroninsatsen bör regelbundet rengöras från öronvax och fukt. **Vanlig insats** lossas från hörapparaten vid slanganslutningen och öroninsatsen rengörs i lämpligt rengöringsmedel.

Öppen insats lossas vid slanginfästningen och speciellt verktyg finns för rensning av plastslang och öroninsats. Tipen/domen är utbytbar.

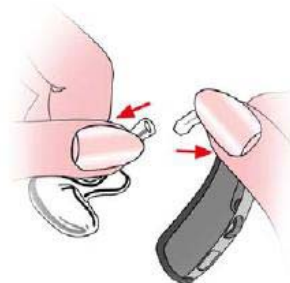

Skölj och torka insatsen efter rengöring och blås rent plastslangen från vatten. Sätt tillbaka insatsen på hörapparaten och vrid i rätt läge.

Hörapparaten är känslig för vatten och fukt. Torka hörapparaten utvändigt med ett mjukt tyg och lägg den att torka t. ex. över ett värmeelement. Hörapparat eller batteri får aldrig utsättas för stark värme.



För skötsel och rengöring av hörapparat finns speciellt anpassade produkter under varumärket HADEO. Se mer på vår hemsida www.medilink.se eller fråga på din hörcentral

Utsätt inte hörapparaten för

- hårda stötar eller slag
- stark värme
- vatten och tvål och hårspray
- starka magnetfält, högfrequensfält eller röntgenstrålning

HANSATON hörapparater är konstruerade för att generera ett minimum av elektromagnetiska fält och också för att störas minimalt av magnetiska fält. Emellertid kan detta inte helt uteslutas vid användning av mobiltelefon



Personliga inställningar/ program
