

EWACS Öronspolare

Ear WATER Cleaning System



Lätthanterlig och effektiv

Behaglig och säker för patienten.

Ansluts till vanlig vattenledning.

Lätthanterlig; tryck bara lätt på "avtryckaren"!

Effektiv behandling genom kontinuerligt vattenflöde.

Behaglig för patienten då vattentryck och flöde är konstanta.

Säker; inställt tryck hålls stabilt av en tryckregulator.

Monteringen är lätt att göra helt utan eller med enkla verktyg.



Öronspolaren består av tryckregulator och spolpistol som ansluts med snabbkopplingar inbördes och till vattenblandare. För bästa temperaturkontroll rekommenderas anslutning till termostatblandare. Då öronspolaren inte används kan blandaren samt handfat eller diskbänk användas som vanligt.



Tryckregulatorn ger ett stabilt spoltryck. Trycket visas på en manometer och justeras lätt med den svarta ratten.



Spolpistolen har bekväm avtryckare och reglerventil som medger "mjukstart" och gör spolningen lätt att utföra. Närmast örat används ett speciellt spolmunstycke i plast. Munstycket byts mellan varje patient.



Spolmunstycket, tillverkat i polyeten, ansluts med snabbkoppling. Det tål rengöring vid behov och är tillverkat av miljövänligt material. Spolmunstycken köps i olika förpackningsstorlekar från 10 till 1000 st. 100 st följer med vid leverans av Öronspolare.



Strålsamlaren (tillbehör) med fäste för snabbkoppling kan placeras i vattenblandarens snabbkoppling då öronspolaren inte används. Därigenom erhålls en mjuk och stänkfri vattenstråle.



Extra Snabbkopplingssats (tillbehör) används för att kunna använda öronspolare på alternativt plats. Genom att montera en extra snabbkoppling på ytterligare en vattenblandare kan öronspolaren lätt flyttas för användning i ett annat rum. Består av snabbkoppling samt två st gängadaptar.



Rondskål med avlopp (tillbehör) finns för att slippa att tömma spillvatten så ofta. Materialet är plast och den tål alla vanligt förekommande rengöringsmedel samt autoklav 135°C. I leveransen ingår en 1,5 m lång PVC-slang.

Rondskålen kan även fås **utan avlopp** (förp. om 5 st).

EWACS Öronspolare, teknisk specifikation

Komplett leverans innehåller:		Regulator med manometer och kopplingar Spolpistol med snabbkopplingar (handel) Slang med snabbkopplingar (handel) Snabbkopplingssats för vattenblandare i 3 delar* Spolmunstycken, sats om 100 st Bruksanvisning	
Förbrukningsmaterial:		Slang utan snabbkopplingar, standard 2 m Spolmunstycken i olika förpackningsstorlekar	
Övriga tillbehör:		Strålsamlare passande till blandarens snabbkoppling Snabbkopplingssats för anslutning till annan blandare Rondskål med avlopp för spillvatten	
Tekniska data:	Material:	Spolpistol Regulatorhus Slang Spolmunstycke	Acetalplast Kromad Mässing Transparent PVC HD polyeten
	Tryck	Vattenblandare (prim.) Spolmunstycke (sek.) Rek. spoltryck	max 25 bar reglerbart 0 – 1 bar 0,2 – 0,3 bar
	Vikt	Komplett Spolpistol	750 g 180 g
	Rengöring	Utvändigt: enligt lokalt förekommande rutiner. Invändigt: töm utrustningen på vatten minst 1 gång per dag och låt torka över natten. Häng upp slangar. Slang: Utöver ovanstående; daglig rengöring med genomspolning i diskdesinfektor/motsvarande. Utbyte 1-4 ggr/månad beroende på användningsfrekvens. Munstycken: Byts ut efter varje patient och kastas eller rengörs med genomspolning i diskdesinfektor. Allmänt: All utrustning genomspolas grundligt med friskt vatten före varje användning i samband med inställning av lämplig vattentemperatur.	

*/ 2 st olika gängövergångar ingår (inv. M22 och utv. M24) passar till all moderna handfats- och diskbänksblandare. Andra gängalternativ kan levereras vid behov.

ÖVRIGT:

Rekommenderad typ av vattenblandare för anslutning av Ewacs Öronspolare:

För maximal temperaturstabilitet och säkerhet rekommenderas anslutning till termostatblandare. Vid normalfunktion kan även engreppsblandare fungera bra.

Kortfattad installationsbeskrivning:

Öronspolaren ansluts till vattenblandare via en snabbkoppling som ersätter befintlig strålsamlare. Tryckregulatorn fästs i blandarens snabbkoppling och spolslang, spolpistol och spolmunstycke ansluts med snabbkopplingar. Blandaren öppnas helt och vattentemperaturen justeras. Spoltrycket ställs in med ratten på regulatorn som är justerbar i utdraget läge och ratten låses därefter. Förinställt spoltryck är ca 0,2 bar. Det kan av praktiska skäl vara lämpligt att spola fram varmvatten innan anslutning av öronspolaren sker

Se Bruksanvisning för utförligare anvisningar om installation och användning!